

# Multilink® Automix

Placement of metal, metal-ceramic and zirconia restorations  
(Inlays, onlays, crowns, bridges)

Befestigung von Metall, Metallkeramik und Zirkoniumoxid  
Restaurationen (Inlays, Onlays, Kronen, Brücken)



## Restoration Restauration

1 Sandblast Sandstrahlen

2 H<sub>2</sub>O

3 AIR!

Metal/Zirconia Primer

4 180 sec

5 AIR!

## Dentin/Enamel Dentin/Schmelz

1 H<sub>2</sub>O


2 AIR!

Mix Multilink Primer A+B 1:1











3

4 15 sec application

5 AIR! 15 Sek. applizieren

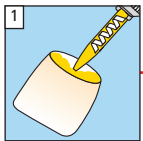

1  
Apply on restoration  
Auftragen auf  
Restauration

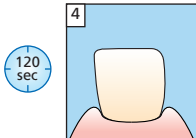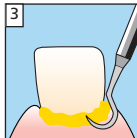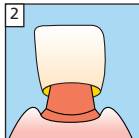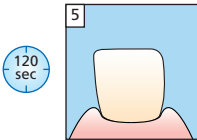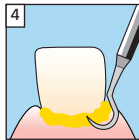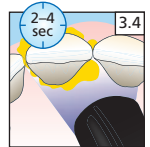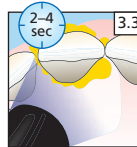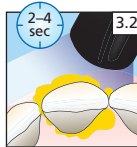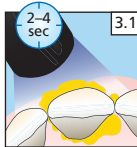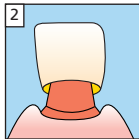

Remove excess immediately!  
Überschüsse sofort entfernen!

CE 0123

Please read Instructions for Use  
Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation